


**1. REFERENCIA: IAPS3**

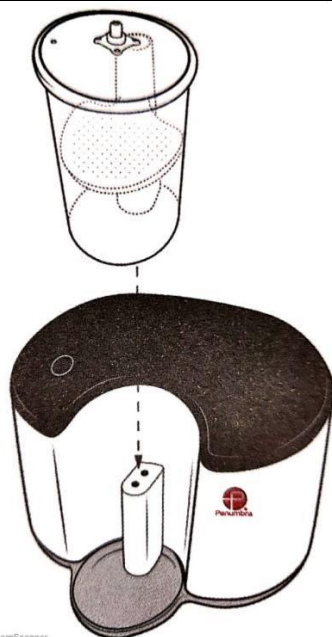

armado con CamScanner

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

<b>Nombre comercial</b>	Canister Bomba Engine
<b>Fabricante</b>	Penumbra, Inc
<b>Marca</b>	Penumbra
<b>Distribuidor</b>	Compañía de Representaciones Medicas S.A - CTP MEDICA S.A
<b>Descripción</b>	Canister transparente de 1000cc con tapa de ajuste fácil, filtro interno y colador.
<b>Registro Sanitario</b>	2020DM-0005690-R1 Fecha de Vigencia: 21 Mayo 2030
<b>Vida útil</b>	3 años
<b>Clasificación de riesgo</b>	III
<b>Factor de Empaque</b>	1 Unidad por caja
<b>Numero de usos</b>	Uso único por paciente
<b>Método de Esterilización</b>	No aplica

**3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

- Canister transparente con capacidad 1000cc, tapa ajustable y filtro.
- Compatibilidad con bomba Engine Penumbra, tubos de aspiración PST2, IST3.

**4. INDICACIONES Y USOS**

- Verificar integridad del canister.
- Conectar a la bomba Engine según manual de uso.
- Verificar el cierre total de la tapa ajustable.

### 5. PRECAUCIONES

- Debe ser utilizado por personal entrenado en el uso de la bomba Engine.
- Dispositivo de un solo uso, no reusar.
- No usar si existen daños en el dispositivo.

### 6. CONTRAINDICACIONES

No existen contraindicaciones conocidas.

### 7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

No require.

### 8. ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar seco a temperaturas de 15 A 25°C.

### 9. MANEJO DE DESECHOS

Disposición de desechos según protocolo de la institución.

### 10. REGULACIONES

El Producto es Regulado por FDA - CE - MARK – INVIMA.

### 11. RECOMENDACIONES DE USO

- Instalar en la bomba de aspiración, bomba de Penumbra Engine.
- Asegúrese de que la tapa está bien cerrada y no haya fugas.
- No dejar que sobrepase de 1000cc el material hemático.
- Emplear con todo el sistema de aspiración de penumbra.

### 12. VENTAJAS

- Capacidad de 1000cc.
- Filtro hidrofóbico que evita el rebosamiento.
- Filtro de trombo que permite la visibilidad y cuantificación del mismo.
- No presenta fecha de caducidad.
- Fácil control del volumen de aspiración.

Código: O1-E-01  
Versión: 01  
Fecha de vigencia: 21 Jul 2020

Version: 01  
Fecha de vigencia: 21 Jul 2020



**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA COLOMBIA**  
KM 1.5 Siberia Cota, Parque empresarial Potrero  
Chico, San Miguel 6 A. Cota – COLOMBIA  
Tel: +57 1 8773979