

SUMINISTROS RADIOGRÁFICOS S.A.S

Nº: OT-907-26

Fecha: 2026-04-17

800099568-9

Calificación: 5

Orden de Trabajo

GENERÓ: ANNY DAYANAGARCIA DUQUE

RESPONSABLE: JHON ESTEBAN CANO MESA

DURACIÓN ESTIMADA: 10:00:00

NOTAS:

ORDEN DE TRABAJO PADRE: OT-304-26

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: RX FIJO CARESTREAM DRX-ASCEND (Q-RAD) X-RAY SYSTEM QRAD-15R-1166 IIB N/D { SR00666 }

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ZONA 2/ HOSPITAL SAN RAFAEL (YOLOMBÓ)

CLASIFICACIÓN 1: HABILITADO CARTERA

TIPO: HORARIO HÁBIL

CLASIFICACIÓN 2: PERCALL

PRIORIDAD: Media

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS / NFC: 4542

TAREA NO PLANIFICADA

DESCRIPCIÓN: CORRECTIVO

FECHA PROGRAMADA: 2026-04-17

FECHA Y HORA DE INICIO: 2026-04-16 09:00

TIPO DE TRABAJO: CORRECTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2026-04-17 11:44

PRIORIDAD: Media

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO: 09:44:01

ACTIVADOR: Tarea no Programada

TIEMPO FUERA DE SERVICIO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 1:

SOLICITADO POR: JHON ESTEBAN CANO MESA

CLASIFICACIÓN 2:

NÚMERO DE SOLICITUD: 13403

FECHA DEL EVENTO: 2026-04-15 12:00

NOTAS: Repuesto solicitado bajo la OT-585-26 y cotizados bajo el consecutivo ST-0219-26. Repuesto aprobado bajo la factura SR9156.

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número De Solicitud	Solicitado Por
13403	JHON ESTEBAN CANO MESA

SUBTAREAS


Grupo/Parte	Procedimiento	Resultado
	¿EL EQUIPO FUE ENTREGADO A TIEMPO POR EL SERVICIO PARA INICIAR LABORES? (SIN DEMORAS POR PARTE DEL CLIENTE).	Si
	DESCRIBA EL PROCEDIMIENTO REALIZADO .	Se revisa estado y funcionamiento del equipo, se procede con el cambio del tanque de alta potencia para probar si se soluciona la falla de anodo volt. Se realiza el cambio de forma satisfactoria y se procede a realizar pruebas de funcionamiento sin falla, se logra solucionar la falla con este repuesto. Luego se recibir instrucciones se realiza la el seasoning del tubo de rx y luego las calibraciones de todo el equipo. También se realiza las pruebas de aceptación y cumplimiento.
	¿EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO?	☒ Si ☐ No ☐ N/A
	NÚMERO DE EXPOSICIONES O DISPAROS DEL TUBO DE RX.	167752
	¿SE REQUIERE CAMBIAR ALGUNA PARTE, ACCESORIO O REFACCIÓN?	☐ Si ☒ No ☐ N/A
	CAUSA RAIZ DEL DAÑO O FALLA DE LA PARTE, ACCESORIO O REFACCIÓN.	N.A
	OBSERVACIONES .	Se realizan pruebas de funcionamiento sin falla. Equipo queda operativo y sin errores.



RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER 51170534 FLUKE CORPORATION FLUKE-179 EDSNF { SR.HER_0016 } ACTIVO N/D	1	---	0	Inventario	ALMACÉN DE HERRAMIENTAS




MODEL 657 BLACK PIRANHA DOSIMETER CB2- 19020268/18240101/D M5-19030037/1901036 RTI ELECTRONICS 9729657-05 { SR.HER_0002 } ACTIVO N/D	1	---	0	Inventario	ALMACÉN DE HERRAMIENTAS
--	---	-----	---	------------	----------------------------




ADJUNTOS DE LA TAREA


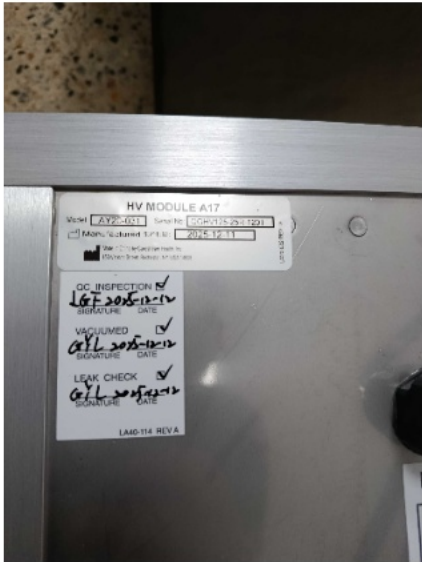
Descripción	Detalles
	
	

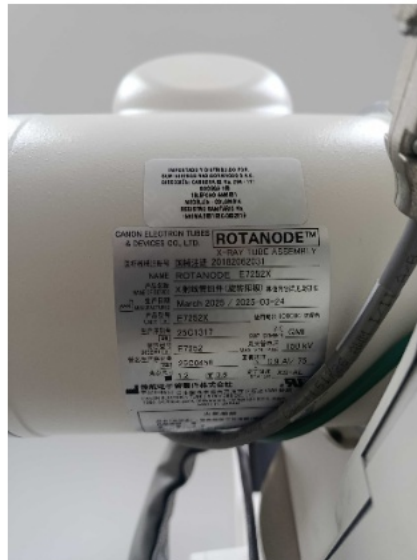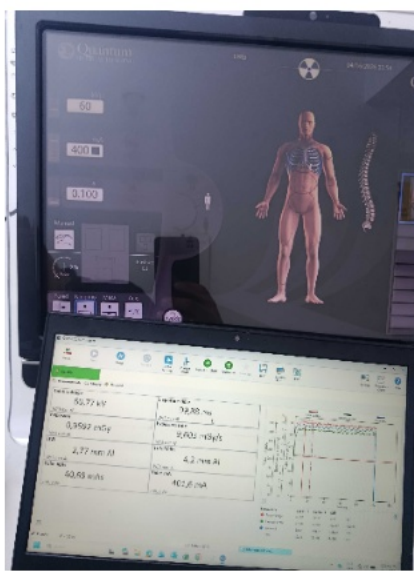



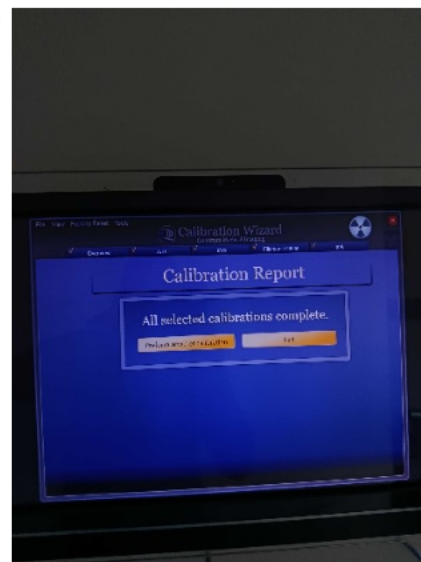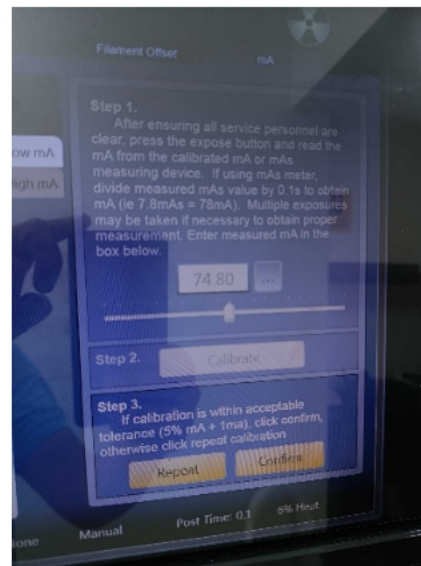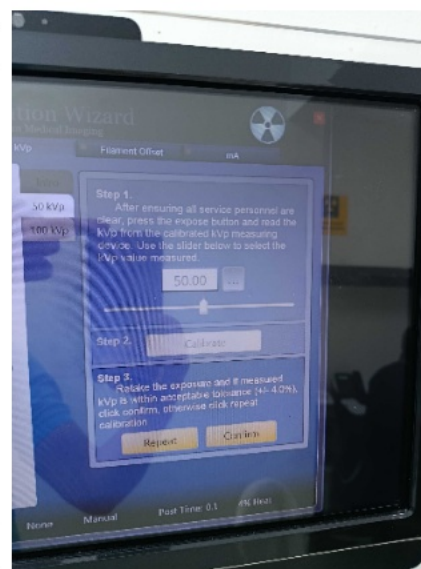

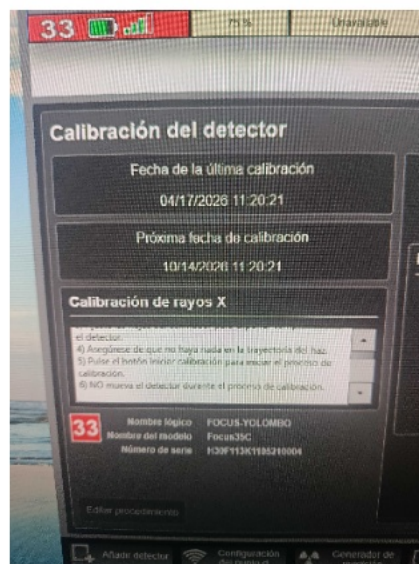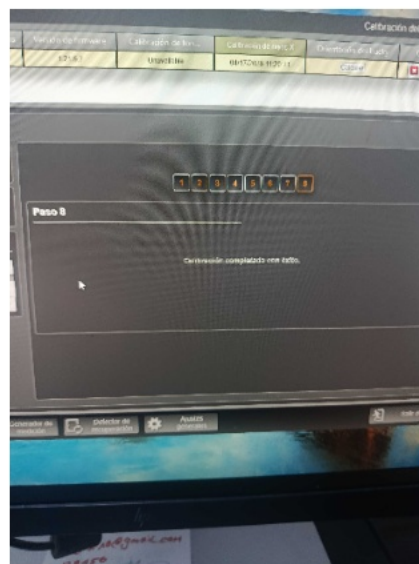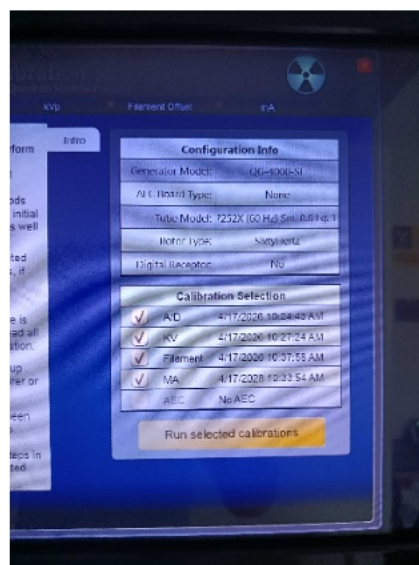

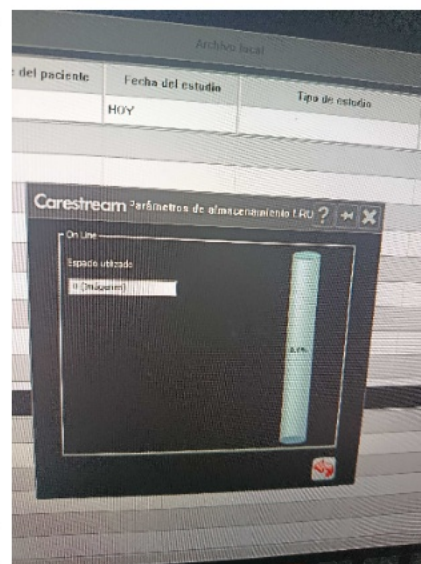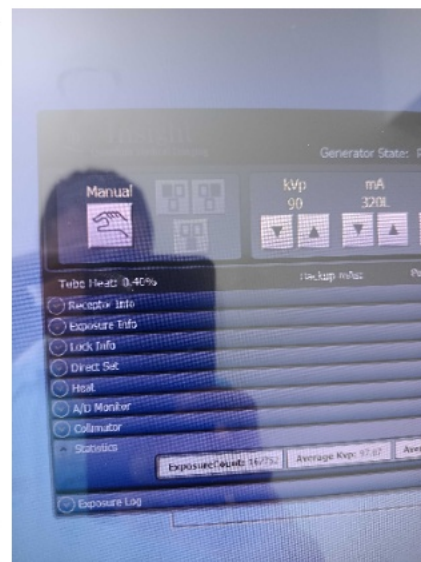



D. España

Daniel España

Aceptado Por

Jhon Cano

JHON ESTEBAN CANO MESA

Realizado Por