


FICHA TECNICA DE PRODUCTO
GEL LUBRICANTE PIEL® NEUTRO

		
Registro Sanitario	INVIMA 2023DM-0026925	
Clasificación Dispositivo	Clase I	
Usos	Lubricante Intimo de base acuosa: Reduce la fricción de las partes íntimas en contacto durante la relación sexual. Compatible con condones de látex. La referencia Neutro no presenta olor ni sabor apreciables, permitiendo experimentar sin límites con sensación natural.	
Especificaciones de Producto	Prueba	Especificación
	Apariencia	Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas
	Gravedad específica	1,055 – 1,085 g/mL
	Viscosidad a 25°C	8.000 – 20.000 cps
	Osmolaridad	Menor a 1200 mOsm/kg
	Compatibilidad	Compatible con condones de látex masculinos y femeninos
	Aerobios mesofilos	Max. 10 ² UFC/g
	Mohos y levaduras	Max. 10 UFC/g
	Cantidad de lubricante	Sachet: 4,5 mL
		Interno
Descripción del producto	GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO facilita la penetración en aquellos casos que la lubricación natural sea deficiente (resequedad vaginal, masturbación), no haya lubricación (sexo anal, uso de juguetes sexuales) o se desee reducir el dolor (penetración fuerte, contracción vaginal) durante relaciones sexuales.	

Instrucciones de uso	<p>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Al momento de uso verifique la fecha de vencimiento y use GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO únicamente si se encuentra vigente. 2- Verifique la integridad del sachet en el cual se encuentra empacado GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado. 3- Abra el sachet y aplique abundante GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO en la parte que desee lubricar (vagina, pene erecto, ano, dedos, juguetes sexuales, etc.). 4- GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO está listo para cumplir su función durante la relación sexual 5- Después de la experiencia con GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO deseche el empaque en la papelería para basura. No utilice el inodoro para tal fin. <p>1. GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO es soluble en agua, lo cual implica que el aseo rutinario es suficiente para remover del cuerpo.</p>
Precauciones de Uso	<ul style="list-style-type: none"> • GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO no es un anticonceptivo ni contiene agentes espermicidas. • GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO en presentación sachet es de uso único. • Los condones de látex son compatibles con GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO. • GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico, en personas sensibles a sus componentes.
Presentaciones Comerciales	<p>Caja por 30 sachets (7703689275884) Caja por 6 sachets (7703689814205)</p>
Condiciones de almacenamiento	<p>Producto no reutilizable. En caso de detectar el sachet roto, no use el producto. Vida útil: 5 años. Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños.</p>
Fabricado por:	<p>Thai Nippon Rubber (TNR) Industry public company limited, Tailandia</p>
Importado y distribuido por:	<p>Asociación PROFAMILIA Calle 34 No 14 -52 Bogotá – Colombia</p>



Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA

Coordinador de Investigación y Desarrollo/Director Técnico

Oscar.tuta@profamilia.org.co