

	DIRECCION TECNICA	Código: FT-DT-106
	FICHA TECNICA CONDON PARA HOMBRE DE LATEX NATURAL	Versión: 0 Fecha: 2019 Abril 2 Página: 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL		COMPONENTES DEL PRODUCTO	
Nombre:	CONDON PARA HOMBRE DE LATEX NATURAL	1 Condón individualmente empacado	
Fabricante:	INNOLATEX SDN. BHD		
Marca:	INNO		
Vida Útil:	5 AÑOS		
Procedencia:	MALASIA		
Registro Sanitario INVIMA:	2018DM-0018975		
Vigencia:	23 Noviembre 2028		
Clasificación de riesgo:	IIB		
Método de esterilización	No aplica		
Descripción y uso del producto	Si se usan adecuadamente, los condones de látex ayudarán a reducir el riesgo de infección por VIH (SIDA), infecciones de transmisión sexual (ITS) y serán altamente efectivos contra embarazos no deseados.		
Indicaciones y precauciones de uso	<p>Indicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Al abrir un condón nuevo, rasgue suavemente a lo largo de un lado. El condón puede dañarse fácilmente con uñas, joyas o dientes.</li><li>• Colóquese el condón después de que el pene esté erecto y antes del contacto íntimo, ya que las lesiones, la secreción antes de la eyaculación, el semen, las secreciones vaginales, la saliva, la orina y las heces pueden contener un organismo de ITS.</li><li>• Apriete el extremo del depósito de condón entre el pulgar y el índice para expulsar el aire de la punta.</li><li>• Coloque el condón sobre la cabeza del pene y desenróllelo o jale hasta la base.</li><li>• Deténgase y compruebe si el condón se desliza o se apriete excesivamente sobre el pene, ya que podría romperse.</li><li>• Después de la eyaculación, retire con cuidado el pene mientras aún esté erecto. Sujete el borde del condón mientras se retira para que el condón no se salga.</li><li>• Para desechar el condón usado, haga un nudo en el extremo del condón usado para sellarlo. Envuélvalo en un pañuelo y deséchelo higiénicamente. No lo tire por el inodoro.</li></ul> <p>Precauciones</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El uso de condones no eliminará totalmente el riesgo de infección. Y para lograr la máxima protección, es importante seguir las instrucciones de uso.</li><li>• Cuando se usan correctamente, los condones pueden ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el embarazo.</li><li>• Use un condón nuevo cada vez que tenga relaciones sexuales u otros actos entre parejas que impliquen contacto con el pene.</li><li>• No reutilice los condones. Los condones son para un solo uso. El condón reutilizado puede romperse y causar contaminación cruzada, lo que resulta en la transmisión de ITS y el embarazo.</li><li>• Si necesita lubricación adicional, use solo lubricantes a base de agua (por ejemplo, glicerina), ya que los lubricantes a base de aceite como la vaselina, el aceite para bebés, las lociones corporales, el aceite de masaje y otros pueden dañar el condón.</li><li>• Consulte con un médico o farmacéutico acerca de la compatibilidad de los medicamentos tópicos que pueden entrar en contacto con el condón.</li><li>• Si el condón se rompe durante el uso, para evitar un embarazo no deseado o la transmisión</li></ul>		

	DIRECCION TECNICA	Código: FT-DT-106 Versión: 0 Fecha: 2019 Abril 2 Página: 2 de 2
	FICHA TECNICA CONDON PARA HOMBRE DE LATEX NATURAL	

	<p>de infecciones de transmisión sexual, consulte a un médico con urgencia, al menos dentro de las 72 horas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los condones normales son solo para uso vaginal y no para el sexo anal. El riesgo de rotura aumenta si se usa para el sexo anal.</li> <li>• No use los condones si el envase individual está dañado. Utilice uno nuevo de un paquete en buen estado.</li> <li>• No usar el condón después de su fecha de caducidad.</li> </ul>
<b>Advertencias</b>	El condón está hecho de látex de caucho natural, que podría causar reacciones alérgicas, incluido un shock anafiláctico si el usuario es alérgico al látex.
<b>Composición</b>	Látex: 78,5%, Polvo Almidón De Maíz: 5,0%, Aceite De Silicona: 16,5%
<b>Contraindicaciones</b>	El condón está hecho de látex de caucho natural, que podría causar reacciones alérgicas, incluido un shock anafiláctico si el usuario es alérgico al látex.
<b>Numero de Re-usos</b>	Un solo uso. Producto descartable
<b>Presentación comercial</b>	Caja por 144 unidades
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos.</li> <li>• Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo.</li> <li>• Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.</li> </ul>
<b>Disposición final:</b>	La disposición final de este producto se debe realizar según el protocolo interno de la institución garantizado el cumplimiento del decreto 351 del 2014 (Febrero 19) del Ministerio de salud "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades"