

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO GEL LUBRICANTE PIEL® NEUTRO



<b>Registro Sanitario</b>	<b>INVIMA 2023DM-0026925</b>																												
<b>Clasificación Dispositivo</b>	<b>Clase I</b>																												
<b>Uso</b>	<b>Lubricante Intimo de base acuosa:</b> Reduce la fricción de las partes íntimas en contacto durante la relación sexual. Compatible con condones de látex. La referencia PIEL Neutro no presenta olor ni sabor apreciables, permitiendo experimentar sin límites con sensación natural.																												
<b>Descripción del producto</b>	<b>Gel lubricante PIEL neutro</b> facilita la penetración en aquellos casos que la lubricación natural sea deficiente (resequedad vaginal, masturbación), no haya lubricación (sexo anal, uso de juguetes sexuales) o se desee reducir el dolor (penetración fuerte, contracción vaginal) durante relaciones sexuales.																												
<b>Especificaciones de Producto</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prueba</th><th>Especificación</th><th>Norma Técnica</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Apariencia</b></td><td>Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas</td><td>UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022</td></tr> <tr> <td><b>Gravedad específica</b></td><td>1,055 – 1,085 g/mL</td><td>UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022</td></tr> <tr> <td><b>Viscosidad a 25°C</b></td><td>8.000 – 20.000 cps</td><td>UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022</td></tr> <tr> <td><b>Osmolaridad</b></td><td>Menor a 1200 mOsm/kg</td><td>UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022</td></tr> <tr> <td><b>Compatibilidad</b></td><td>Compatible con condones de látex masculinos y femeninos</td><td>UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022</td></tr> <tr> <td><b>Aerobios mesofilos</b></td><td>Max. 10<sup>2</sup> UFC/g</td><td>UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022</td></tr> <tr> <td><b>Mohos y levaduras</b></td><td>Max. 10 UFC/g</td><td>UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022</td></tr> <tr> <td><b>Cantidad de lubricante</b></td><td>Sachet: 4,5 mL</td><td>Interno</td></tr> </tbody> </table>		Prueba	Especificación	Norma Técnica	<b>Apariencia</b>	Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022	<b>Gravedad específica</b>	1,055 – 1,085 g/mL	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022	<b>Viscosidad a 25°C</b>	8.000 – 20.000 cps	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022	<b>Osmolaridad</b>	Menor a 1200 mOsm/kg	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022	<b>Compatibilidad</b>	Compatible con condones de látex masculinos y femeninos	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022	<b>Aerobios mesofilos</b>	Max. 10 <sup>2</sup> UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022	<b>Mohos y levaduras</b>	Max. 10 UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022	<b>Cantidad de lubricante</b>	Sachet: 4,5 mL	Interno
Prueba	Especificación	Norma Técnica																											
<b>Apariencia</b>	Gel transparente y viscoso libre de partículas extrañas	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022																											
<b>Gravedad específica</b>	1,055 – 1,085 g/mL	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022																											
<b>Viscosidad a 25°C</b>	8.000 – 20.000 cps	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022																											
<b>Osmolaridad</b>	Menor a 1200 mOsm/kg	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022																											
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con condones de látex masculinos y femeninos	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022																											
<b>Aerobios mesofilos</b>	Max. 10 <sup>2</sup> UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022																											
<b>Mohos y levaduras</b>	Max. 10 UFC/g	UNFPA TECHNICAL BRIEF   May 2022																											
<b>Cantidad de lubricante</b>	Sachet: 4,5 mL	Interno																											
<b>Instrucciones de uso</b>	<b>IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar GEL LUBRICANTE PIEL NEUTRO:</b>  1- Al momento de uso verifique la fecha de vencimiento y use Gel lubricante PIEL neutro únicamente si se encuentra vigente. 2- Verifique la integridad del sachet en el cual se encuentra empacado Gel lubricante PIEL neutro. Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado. 3- Abra el sachet y aplique abundante Gel lubricante PIEL neutro en la parte que desee lubricar (vagina, pene erecto, ano, dedos, juguetes																												

	<p>sexuales, etc.).</p> <p>4- Gel lubricante PIEL neutro está listo para cumplir su función durante la relación sexual</p> <p>5- Después de la experiencia con Gel lubricante PIEL neutro deseche el empaque en la papelera para basura. No utilice el inodoro para tal fin.</p> <p>6- Gel lubricante PIEL neutro es soluble en agua, lo cual implica que el aseo rutinario es suficiente para remover del cuerpo.</p>
<b>Precauciones de Uso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gel lubricante PIEL neutro no es un anticonceptivo ni contiene agentes espermicidas.</b></li> <li>- Gel lubricante PIEL neutro es de uso único.</li> <li>- Los condones de látex son compatibles con Gel lubricante PIEL neutro.</li> <li>- Gel lubricante PIEL neutro puede causar reacciones alérgicas, incluyendo choque anafiláctico, en personas sensibles a sus componentes.</li> </ul>
<b>Presentaciones Comerciales</b>	<p>Caja con 6 sachets. (Código de barras: 7703689814205)</p> <p>Caja dispensadora con 30 sachets (Código de barras: 7703689275884)</p>
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<p>Producto no reutilizable.</p> <p>Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>En caso de ruptura del empaque, no use el producto.</p> <p>Vida útil: 3 años</p>
<b>Fabricado por:</b>	<p>Thai Nippon Rubber (TNR)</p> <p>Industry Public Company Limited, Tailandia</p>
<b>Importado y distribuido por:</b>	<p>Asociación PROFAMILIA</p> <p>Bogotá D.C., Colombia</p>



**Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA**

Coordinador de Investigación y Desarrollo/D.T.

[Oscar.tuta@profamilia.org.co](mailto:Oscar.tuta@profamilia.org.co)