

Informe De Mantenimiento Equipos De Red De Gas Medicinal

INSTITUCIÓN:	Hospital Luis Pasteur
NIT:	890702369-4
DIRECCIÓN:	a 8-44, Cra. 26 #8-2
CIUDAD:	Melgar - Tolima
FECHA DE EVALUACIÓN:	19 de junio del 2026

Mantenimiento Integral

En la visita realizada en el mes de junio de 2026, se realizó mantenimiento preventivo integral a los equipos de la red de gases medicinales de la institución: Hospital Luis Pasteur – Melgar, esta actividad consiste en lo siguiente:

Mantenimiento Integral:

1. Inspección visual y evaluación del estado general: Se verifica la integridad física de los materiales para asegurarse de que no hayan daños que puedan afectar el flujo de gases.
2. Pruebas de funcionamiento: Se realizan pruebas para verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos y dispositivos asociados a la red de gas medicinal.
3. Se llevan a cabo acciones preventivas como ajustes, lubricación y limpieza
4. Se realizan pruebas de presión para asegurarse que las conexiones puedan manejar las presiones operativas especificadas sin fugas.
5. Se genera un informe detallado que documenta todas las actividades realizadas durante el mantenimiento integral, se incluye los resultados de las inspecciones y recomendaciones necesarias para el buen funcionamiento de la red.
6. Se asegura que el mantenimiento cumple con todas las normativas aplicables para sistemas de gases medicinales.

Ejecución

Se hizo revisión y mantenimiento a los equipos de la red de gases medicinales en las áreas mencionadas:

1. Sala procedimientos y reanimación
2. Sala ERA
3. Urgencias
4. Hospitalización y partos
5. Observación (pediatría, hombres y mujeres)
6. Central de gases urgencias y central de gases hospitalización partos

Se realizan las siguientes rutinas de mantenimiento preventivo en cada uno de los equipos que conforman la red de gases medicinales en las áreas mencionadas de la institución:

- Se realizó limpieza y cambio de o ring en tomas de oxígeno, se dejan funcionando y sin fugas.
- Se realizó limpieza y verificación de fugas y funcionamiento en cajas de cortes de dos y tres gases.
- Se realiza limpieza general, verificación de funcionamiento y sistema eléctrico y electrónico de Alarmas de área dos y tres gases, las cuales se encuentran funcionando correctamente.
- Se verifica fugas y se realiza limpieza general de tubería y accesorios en zonas visibles
- Revisión del funcionamiento de manifold de Oxígeno de 2x10, sistema de acoples, mangueras de alta presión. Se realizan pruebas de fugas de los Manifold en roscas, soldaduras, mangueras y reguladores. (Central de gases – urgencias)
- Revisión del funcionamiento de manifold de Oxígeno de 2x4, sistema de acoples, mangueras de alta presión. Se realizan pruebas de fugas de los Manifold en roscas, soldaduras, mangueras y reguladores.






Correctivos realizados








- En la central de gases de urgencias, en el manifold de oxígeno se reparo regulador victor, se cambió KIT de empaques. Y, se corrigió fuga acople CGA manguera de alta presión.
- En la central de gases hospitalización y partos, en el manifold de oxígeno se instalan dos mangueras de alta presión con acople CGA540. Se corrige fuga en válvula CGA #5 del brazo derecho.
- Se corrigen 3 fugas en tomas de oxígeno hospitalización – partos.




Observaciones

- Válvula de oxígeno en la caja de corte de la sala de partos presenta fuga. Se recomienda cambiar caja de corte.

Registro fotográfico

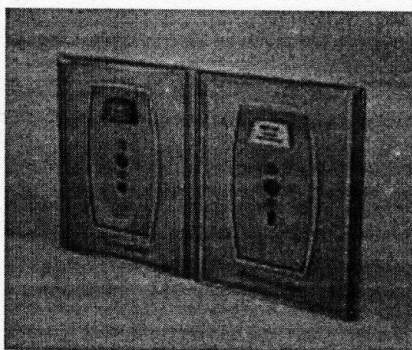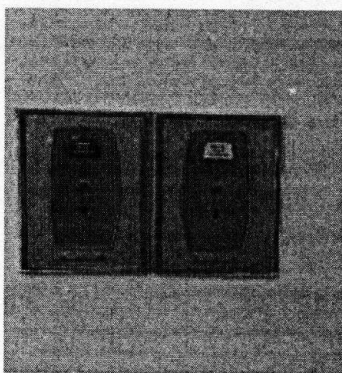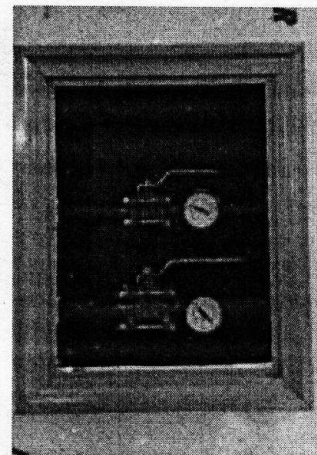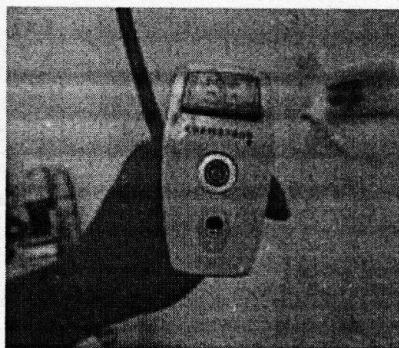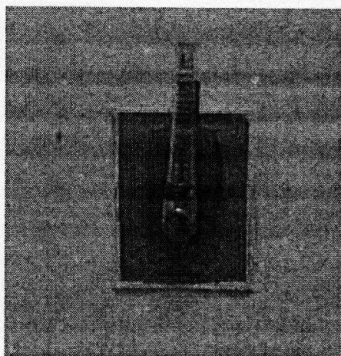

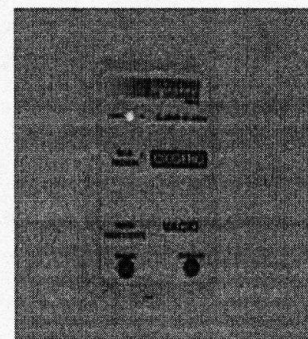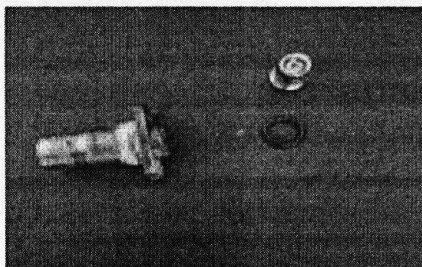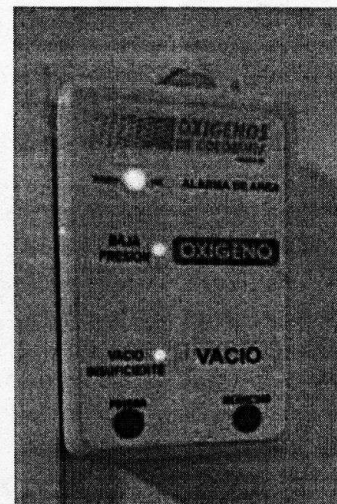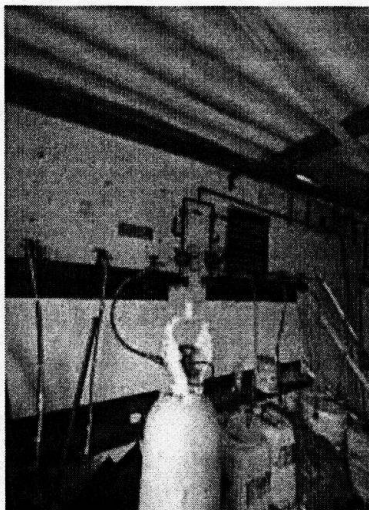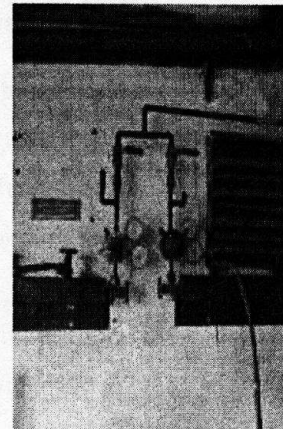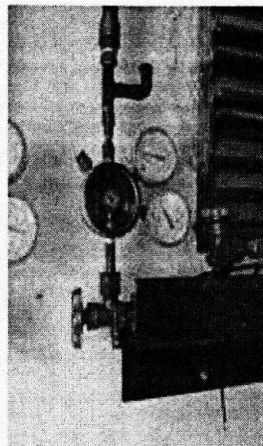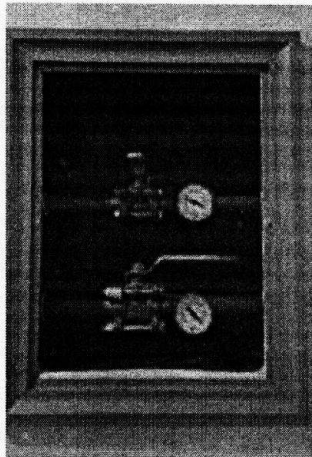

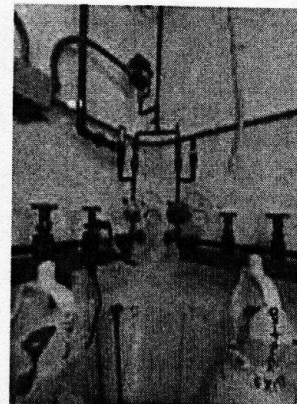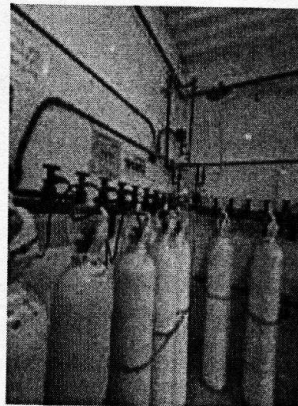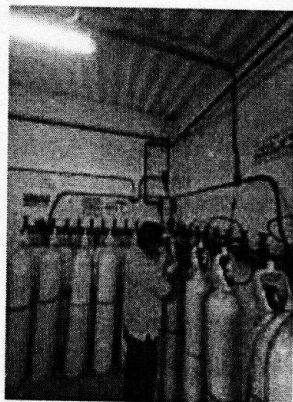

Observaciones

Los equipos que conforman la red de oxígeno de la institución, se encuentra en buen estado, en excepción de los correctivos, los equipos quedan en óptimas condiciones de uso.

Entrega:

Henry Gelvez

Henry Gelvez
Coordinador de Mantenimiento
Oxitolima

Recibe:

[Signature]


	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES GASES MEDICINALES	Código: ERED-IFM-MTTO
		Version: 01
	INFORME DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Fecha: Enero 2021

INFORMACION DEL CLIENTE	
Institución:	Hospital Luis Pasteur
Nit:	
Dirección Y Ciudad:	Melgar

INFORMACION BASICA			
Equipo:	Manifold oxígeno	Serie:	N/A
Marca:	N/A	Modelo:	N/A
Ubicación:	Central gases	Servicio:	oxígeno

FALLA REPORTADA
Mantenimiento correctivo regulador y instalación de 2 mangueras

INFORMACION DEL MANTENIMIENTO
Fecha De Mantenimiento: 19 Junio 2026
Tipo De Mantenimiento: correctivo
se cambio kit de empaquetadura en regulador visto se instalaron 2 mangueras de alta presión con acople CGA 540 se realizó prueba de funcionamiento y se dio OK
Observaciones: el manifold 2x4 oxígeno se dio funcionamiento correctamente

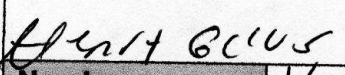Realizado por:		Recibido por:	
			
Nombre:	Henry Gilus	Nombre:	Miguel E. Lozano
Cedula:	91464671	Cedula:	14.230.758
Cargo:	Técnico	Cargo:	tec. operativo

	PROCESO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES GASES MEDICINALES	Código: ERED-IFM-MTTO
	INFORME DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Version: 01
		Fecha: Enero 2021

INFORMACION DEL CLIENTE	
Institución:	Hospital Luis Pasteur
Nit:	
Dirección Y Ciudad:	Medgar

INFORMACION BASICA			
Equipo:	red gases Medicinales	Serie:	N/A
Marca:	N/A	Modelo:	N/A
Ubicación:	central gases urg-Hosp-pasteur	Servicio:	oxigeno

FALLA REPORTADA
Mantenimiento Preventivo red oxigeno en urgencias y Partos y Hospitalización

INFORMACION DEL MANTENIMIENTO	
Fecha De Mantenimiento:	19-JUNIO 2020
Tipo De Mantenimiento:	Preventivo
Se realizó mantenimiento en Monifal oxigeno 2X10 Se realizó mantenimiento en Tomas, alarmas, cajas de corte Se verifico Fugas y Funcionamiento de cada unidad Se reviso presión de Trabajo, se corrigio Fugas en Tomas y monifal.	
Observaciones:	caja corte sala parto presenta fuga en válvula se corrigio Fugas en varias Tomas y en monifal La red se dea Funcionando correctamente

Realizado por:		Recibido por:	
Henry Gius			
Nombre:	Henry Gius	Nombre:	Miguel E. Lozano
Cedula	91464641	Cedula	14250158
Cargo	Tecnico	Cargo	Tec. operador